




Guida Rapida – Installazione e Configurazione

Installazione

1. Anelli

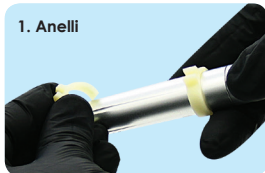


2. Tubo corto



3. Connettore




4. Cannula iVac

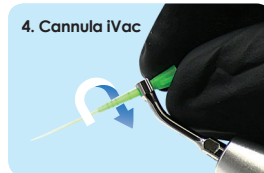


5. Connettore a gomito



6. Tubo lungo maschio

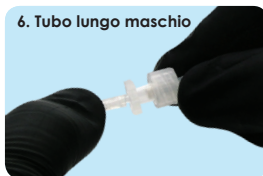


7. Tubo lungo femmina

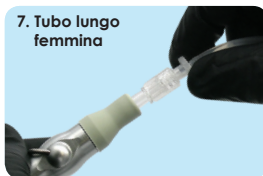

8. Cannula capillare angolata



Irrigazione integrata da serbatoio o bottiglia

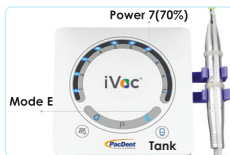

1. Potenza 70%, Modalità E, icona serbatoio




2. Bottiglia



3. Regolazione volume di irrigazione

Irrigazione con siringa e cannula

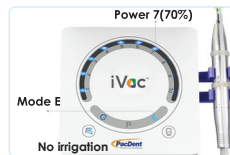

1. Potenza 70%, Modalità E, icona rubinetto



2. Siringa e Cannula angolata



-Premere 2 volte il bottone E per attivare il time di 30 secondi

-Irrigare solo all'interno della camera pulpare

-Attivare la cannula iVac solo all'interno del canale

-Sciacquare con acqua distillata dopo l'uso (Modalità risciacquo)

Per maggiori info consultare le istruzioni d'uso





Suzhou Pac-Dent Technology Co., Ltd.
18, Yuanqi Road, Suzhou City,
215133 Jiangsu, China



EC REP

Lins Service&Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124,
Heidelberg, Germany

Irrigazione integrata da serbatoio o bottiglia

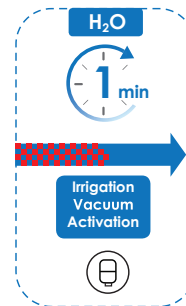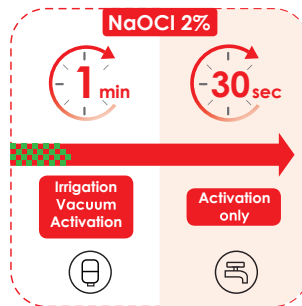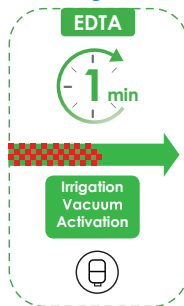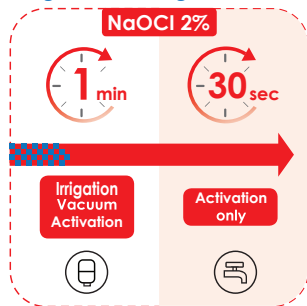

Irrigazione con siringa e cannula

